



Опоры-ходунки

W HR, W Universal, W Navigator,
W Support



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	5
2.3. Пересадка с кресло-коляски на опоры-ходунки.....	5
2.4. Передвижение на опорах-ходунках.....	6
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	8
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	10

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик опор-ходунков W HR, W Universal, W Navigator, W Support.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Опоры-ходунки W HR, W Universal, W Navigator, W Support предназначены для облегчения передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и координации движения.

1.2 Технические характеристики

механизм	складной	все модели
материал	алюминий	все модели
шаг регулировки высоты, см	2,5	все модели
конструкция	“без шага”	W Support, R Kid
	“с шагом/ без шага”	W HR, W Universal, W Navigator
фиксирующий замок	одинарный	W HR, W Universal, W Navigator
особенность	двухуровневые	W HR
	детские	W Support
производство	Китай	все модели
гарантия	6 мес.	все модели

1.3 Упаковка

В комплектации: ходунки, руководство по эксплуатации.



2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.


2.2 Порядок работы

Ходунки продаются в собранном виде.

1. Вытащите изделие из коробки.
2. Поверните обе стороны ходунков, пока не услышите характерный щелчок.
3. Отрегулируйте высоту ходунков. Убедитесь, что ножки ходунков находятся на одинаковой высоте. Медные фиксирующие шарики должны полностью выскочить из отверстий.
4. Чтобы сложить ходунки, необходимо нажать на фиксирующий замок и повернуть обе стороны ходунков внутрь.

2.3. Пересадка с кресло-коляски на опоры-ходунки

Убедитесь, что колеса вашей кресло-коляски стоят на тормозах. Поднимитесь с кресло-коляски, опираясь на подлокотник одной рукой и, держась за ходунки другой рукой (попросите помощь сопровождающего лица, если необходимо).

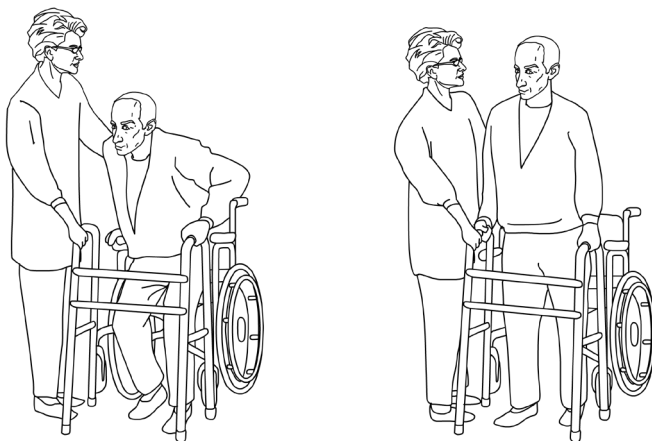

Пересадка с кресло-коляски на опоры-ходунки, в случае травмы правой ноги
Убедитесь, что колеса вашей кресло-коляски стоят на тормозах. Поднимитесь с кресло-коляски. Для этого положите левую руку на опоры-ходунки, следом положите правую руку на опоры-ходунки. В случае травмы левой ноги, положите

сначала правую руку, а затем левую руку на опоры-ходунки.

2.4. Передвижение на опорах-ходунках:

1. Встаньте перед ходунками так, чтобы ножки опор-ходунков доходили до середины ваших ног.



2. Поднимите опоры-ходунки и поставьте их перед собой. Убедитесь, что все ножки опор-ходунков плотно прилегают к полу. Сделайте шаг.



3. Осторожно передвигайтесь вперед по одному шагу.



3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной реклаamacии. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати,
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Опоры-ходунки W HR, W Universal, W Navigator,
W Support

Производитель: Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd,
Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО "СИМС-2"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принимающих декларацию о соответствии
Зарегистрировано Филиал № 2 Московской регистрационной палатой 15 апреля 1999 года,
ОГРН 1027739438902

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
ул. Новопоселковская, дом 6, г. Москва, 125363, телефон (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, E-mail
info@sims2.ru

в лице генерального директора С. П. Бадалаяна

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Ходунки шагающие серии W, с принадлежностями: I. Ходунки шагающие серии W, модели: W HR, W Standart, W Universal, W Support, W 2Fix, W Navigator. II. Принадлежности: Насадка резиновая W Tip HR. Насадка резиновая W Tip Standart. Насадка резиновая W Tip Universal. Насадка резиновая W Tip Support. Насадка резиновая W Tip 2Fix. Насадка резиновая W Tip Navigator. Дополнительная опора к опорам-ходункам модель W-Aid. Колеса к опорам-ходункам модель W-Cast. Колеса к опорам-ходункам с поворотом на 360° модель W-Rote.

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

Серийный выпуск

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора контракта, накладные)

Изготовитель Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd.

наименование изготовителя

Xingxian Development Zone., Changhongling Industrial Park, (2nd period), Dali, Nanhai District, Foshan City, Китай, 528234. Тел. +86-757-81821201, +86-757-81821202, +86-757-81821203

страны и т.п.)

Код ОК 005-93 (ОКП): 94 5150

Код ТН ВЭД России: 9021 10 100 0

соответствует требованиям

ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51080-97, ГОСТ Р 51632-2000

обозначение нормативных документов, соответствию которым подтверждаете данной декларацией. С указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

Протокол испытаний № 12.1634ПТИ/2011 от 13 июля 2011 года Испытательный лабораторный центр ФГУ "НИИ ФХМ" ФМБА России, рег. № РОСС RU.0001.21ИМ33

Протокол испытаний № 5471.011 от 13 июля 2011 года Испытательный лабораторный центр ФГУ "НИИ ФХМ" ФМБА России, рег. № РОСС RU.0001.21ИМ33

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10858 от 18 ноября 2011 года, срок действия не ограничен

информация о документе, являющемся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации: 25.07.2012

Декларация о соответствии действительна до: 25.07.2015

М.П. «СИМС-2»
«СИМС-2»

подпись

Генеральный директор

С. П. Бадалаян

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭНЕРГИЯ ПЛЮС"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Ул. Сосновая аллея, д. 6, офис 6, г. Королев, Московской обл., 141075, тел./факс (495) 502-888-1, 502-888-2, 502-888-9, http://www.1011455.ru

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ИМ25 выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации 25.07.2012, регистрационный номер декларации РОСС CN.ИМ25.Д07502

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П.



подпись

Н.П. Шандова

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

№ 003353

Для заметок